

DNIPRO Gen 2

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБУ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЖГУТ КРОВОСПИННИЙ «Дніпро»

ТУ 32.5-34228792-001:2022



Назва медичного виробу:

Джгут кровоспинний «Дніпро»
генерація 2
*далі джгут

Склад та опис виробу:

Джгут кровоспинний розміром 94x4 см(см). Липучка фіксатор довжиною 80 см(см). Металевий стоп-фіксатор «вороток» діаметром 1.35 см(см) та довжиною 15 см(см). Платформа з кліпсою розміром 6x10 см(см). Пряжка металева (прямокутник) 5.0x3.5 см(см), зовнішня ремінна стрічка.

Призначення:

Зупинка критичної кровотечі на верхніх та нижніх кінцівках.

Застереження:

Використовувати за призначенням. Використання будь-якого джгута більше 2 годин може призвести до незворотнього неврологічного або м'язового пошкодження.

Область застосування:

Для надання першої домедичної допомоги у медичних закладах, каретах швидкої допомоги, похідних умовах, під час воєнних дій та в інших екстремальних ситуаціях.

Спосіб застосування:

Відповідно до техніки накладання джгута, дивитись схему на звороті.

Умови зберігання:

Зберігати в чистому сухому приміщенні, при відносній вологості повітря 10-80% та температурному режимі від 5°C до 25°C. Уникати прямих сонячних променів.

Термін придатності:

2 роки з дати виготовлення. Не стерильно. Для одноразового використання. Після розпакування зберігати в закритій аптечці або підсумку.

Виробник:

ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПРОСТІР» Україна,
49019, Україна, м.Дніпро,
вул. Академіка Белелюбського, буд. 68.
тел.: +38 (067) 387 61 35

ДЖГУТ КРОВОСПИННИЙ «Дніпро»

сайт: www.tqdnipro.com


електронна адреса: priem@prostir-e.com

Інструкція розроблена, впроваджена
ТОВ «Виробнича компанія ПРОСТІР» 12.05.2022



СХЕМА НАКЛАДАННЯ ДЖГУТА

1

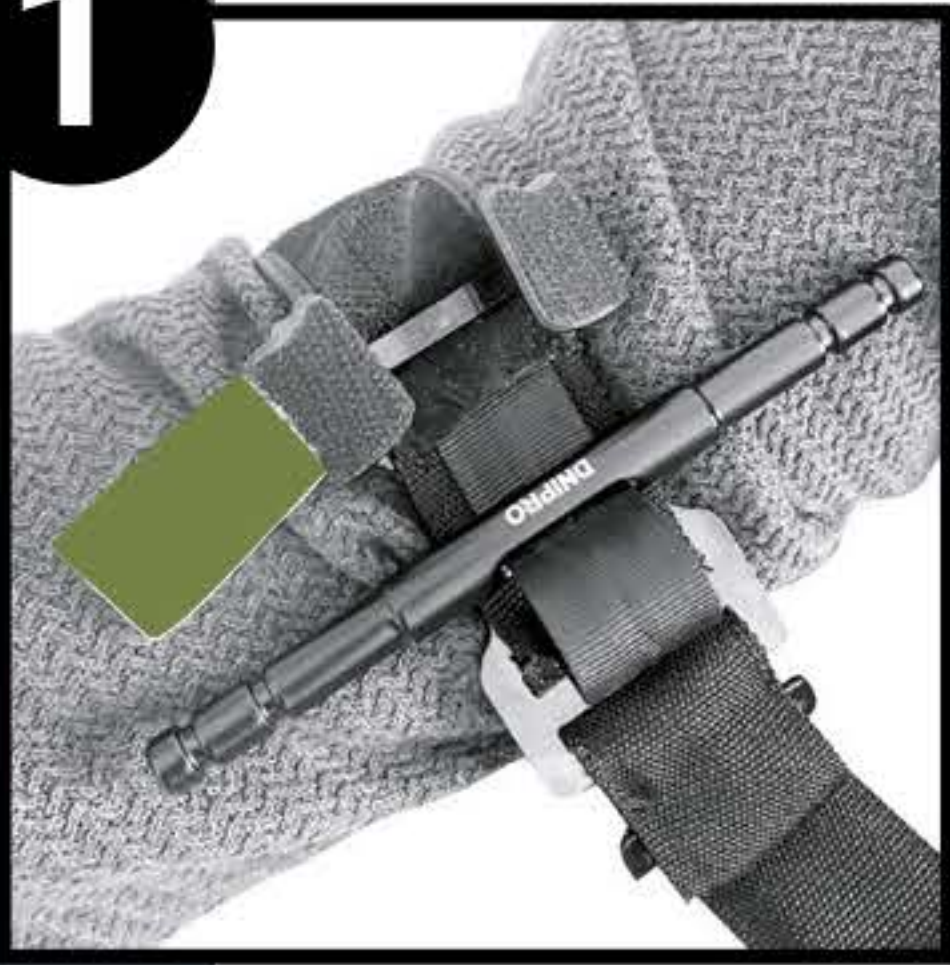

Розгорніть складений джгут. Одягніть утворену петлю на поранену кінцівку. Розмістіть джгут якомога вище місця поранення та перпендикулярно до кінцівки.

2



Якомога щільніше затягніть джгут навколо кінцівки, та зафіксуйте липучку притиснувши верхню до нижньої.

***При нещільному накладанні першого оберту джгута та неміцному притисканні липучки фіксатора, справна**

робота виробу не гарантується.

3



Поверніть декілька разів стоп-фіксатор «вороток», до того моменту, доки не припиниться кровотеча та в пораненій кінцівці

не перестане відчуватися пульс. Напрямою обертанням стоп-фіксатора «воротка» значення не має.

***За результатами проведених практичних досліджень, при перпендикулярному розміщенні джгута по відношенню до кінцівки та щільному**

першому оберті для перекриття критичної кровотечі рекомендовано, на верхніх кінцівках - до 3-х півобертів, на нижніх - до 5-и півобертів.

4



Закріпіть стоп-фіксатор «вороток» у фіксуючу кліпсу. Перевірте наявність кровотечі та пульсу. Якщо кровотеча не припинилась або відчувається пульс, зробіть ще один напівоберт стоп-фіксатора «воротка» або накладіть

другий джгут вище та поряд з першим. Перевірте кровотечу та пульс наново.

5



Вільний кінець джгута закріпіть над стоп-фіксатором між кліпсами та прикріпіть верхню липучку до кліпси, поверх джгута.

6



Після фіксації верхньої липучки на кліпсі, напишіть на ній час накладання джгута. Підготуйте потерпілого для транспортування.

ВАЖЛИВО!!!

СХЕМА НАКЛАДАННЯ ДЖГУТА НА НИЖНЮ КІНЦІВКУ:



Правильно використовувати джгут, провівши стрічку через два отвори пряжки та притримуючи однією рукою за стоп-фіксатор щільно затягнути джгут другою рукою.



Можливе використання джгута для самопомоги та взаємодопомоги при просуванні стрічки лише через один отвір пряжки

ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ДЖГУТА БІЛЬШЕ 2 ГОДИН МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЗВОРОТНОГО НЕВРОЛОГІЧНОГО АБО М'ЯЗОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ.